

PROBLEMA

CARIE NASCOSTE?




Un'alta percentuale di solchi occlusali sospetti nasconde un inizio di carie



Apparentemente il dente sembra sano ma la presenza di discolorazioni superficiali e aree decalcificate fanno sospettare la presenza di carie




La sonda non penetra e non è ritenuta nel solco occlusale

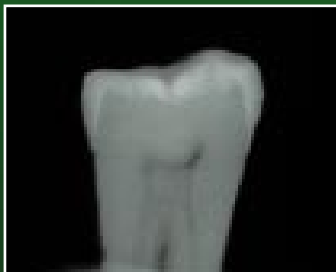

La radiografia non evidenzia la presenza di carie...



... che invece risulta evidente nel campione sezionato

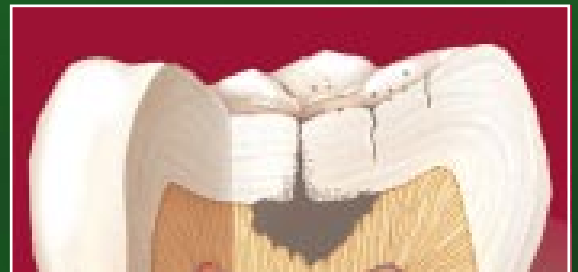

Carie nascoste... da oggi con Fissurotomy® facili da individuare


SOLUZIONE

Metodo Fissurotomy®

Frese in Carburo micro-invasive

Un metodo conservativo per la diagnosi e il trattamento di carie nascoste

Fissurotomy® una fresa UNICA!!!

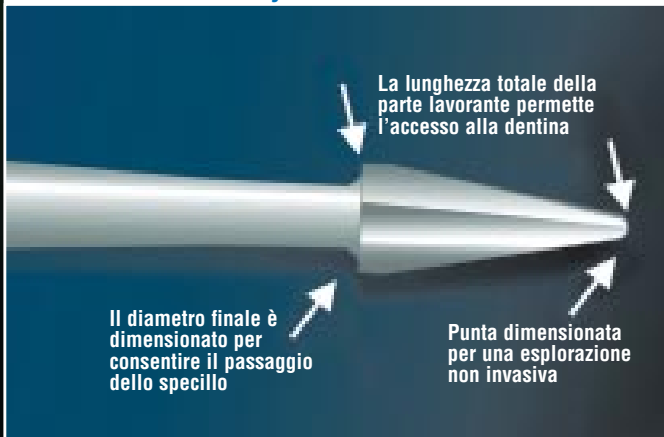



Progettata come un "Calibro di profondità"

RISULTATO

Una Preparazione Conservativa


La fresa Fissurotomy® permette l'esplorazione di solchi occlusali. È virtualmente indolore e forma una ideale preparazione di cavità per contenere compositi fluidi. È possibile esplorare ed otturare il solco in meno di 5 minuti.

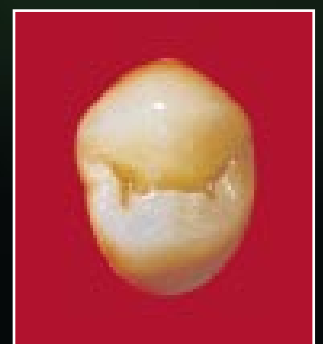

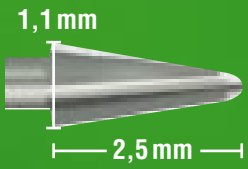

18010-5 Fissurotomy® Original FG-314 Standard Blister 5 pz
 # 18011-5 Fissurotomy® Original FG-313 Corto Blister 5 pz


La larghezza di 1,1 mm consente accesso e visibilità.
 La lunghezza di 2,5 mm permette di valutare a quale profondità si trova la fresa nello smalto e quanto dista dalla dentina

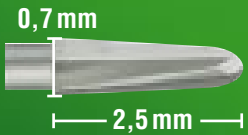

18014-5 Fissurotomy® NTF FG-314 Standard Blister 5 pz
 # 18016-5 Fissurotomy® NTF FG-313 Corto Blister 5 pz

La larghezza massima (0,7 mm) è inferiore rispetto all'Original ed è pertanto meno invasiva.

La ridotta conicità consente la massima conservazione della struttura del dente

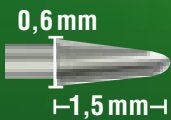

18013-5 Fissurotomy® STF FG-314 Standard Blister 5 pz
 # 18015-5 Fissurotomy® STF FG-313 Corto Blister 5 pz

La larghezza di 0,6 mm è ulteriormente ridotta. Ideale per prima dentizione, per premolari di adulti e per una migliore tenuta del sigillante nel trattamento dello smalto



18007 Fissurotomy® Set

- 1 Portafrese Autoclavabile
- 3 Fissurotomy® Original **18010** FG Standard
- 3 Fissurotomy® NTF **18014** FG Standard
- 3 Fissurotomy® STF **18013** FG Standard
- 1 Carbuco Finitura 12 Lame **7901** FG Standard
- 1 Carbuco Finitura 12 Lame **7406** FG Standard

LA SOLUZIONE GLOBALE



Richiedi l'OFFERTA in vigore al n. 02 910 48 70

Codice	Descrizione	Contenuto	N° Conf.	Totale €
# 18007	Fissurotomy® Set	11 frese		
# 18010-5	Fissurotomy® Original	5 frese		
# 18011-5	Fissurotomy® Original	5 frese		
# 18014-5	Fissurotomy® NTF	5 frese		
# 18016-5	Fissurotomy® NTF	5 frese		
# 18013-5	Fissurotomy® STF	5 frese		
# 18015-5	Fissurotomy® STF	5 frese		
# 7406	Finitura 12 Lame FG 314	5 frese		
# 7901	Finitura 12 Lame FG 314	5 frese		
TOTALE				

SI con l'ordine desidero ricevere un CD dimostrativo gratuito

Studio Dentistico _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____

Telefono _____ e-mail _____

Firma per Accettazione _____

Vostro Deposito Dentale di fiducia _____

Città _____ Telefono _____

Due Sistemi di Ordinazione:
 1. Completare il modulo e faxare al n. **02 910 48 70**
 2. Via e-mail: northbel@northbel.it